

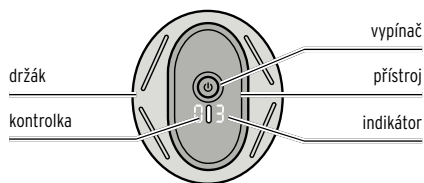


Korektor držení těla

cs Návod k použití

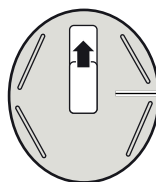


Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál.

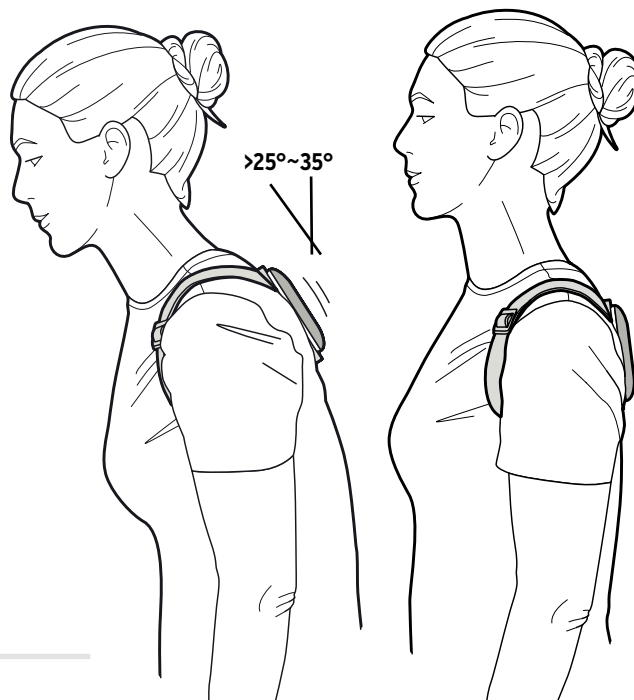

▷ Pro vyjmutí přístroje z držáku posuňte přístroj nahoru.

▷ Pro nabíjení akumulátoru připojte přístroj pomocí adaptéru USB k elektrické síti.

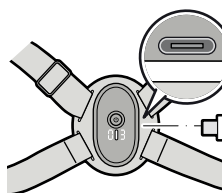

Vážení zákazníci,

v důsledku našeho moderního životního stylu, který nás často nutí k sedavým činnostem, si řada z nás navykne na nevhodné držení těla. Většinou téměř nezaznamenáme, že se stále více předkláníme, a do vzpřímeného sezení a stání se musíme cíleně nutit.

Pro podporu vzpřímeného držení těla Vám Váš nový korektor držení těla prostřednictvím vibračního signálu připomene, že se máte narovnat, jakmile svá záda nakloníte o více než o 25° dopředu.

Bezpečnostní pokyny ⚠

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Korektor držení těla je určen k indikaci správného držení těla a lze ho nosit jak přes oblečení, tak i pod oblečením.
- Korektor držení těla je koncipován pro soukromé použití. Není vhodný pro kliniku, terapeutické ordinace, fitness studia nebo wellness studia apod. Korektor držení těla není zdravotnickým přístrojem a není určen k lékařské korekci.
- V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte se svým lékařem.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístroje

- Tento přístroj smí používat děti ve věku 3 až 8 let, pokud jsou během používání pod stálým dohledem dospělé osoby.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje, a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, kdy jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

Nebezpečí ohrožení života pro nositele kardiostimulátorů

- Elektromagnetická pole vycházející z tohoto elektrického výrobku mohou za určitých okolností rušit funkci Vašeho kardiostimulátoru. Jejich hodnoty se však pohybují daleko pod mezními hodnotami. Než začnete výrobek používat, kontaktujte proto svého lékaře a výrobce kardiostimulátoru.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Výrobek se smí nabíjet pouze v suchých vnitřních prostorách.
- K nabíjení používejte pouze vhodný síťový adaptér USB střídou ochrany II (symbol: , schválený pro výrobky pro domácnost, s výstupem bezpečného velmi nízkého napětí (SELV) 5 V / max. 1 A (viz také „Technické parametry“) a pouze příložený nabíjecí kabel.
- Nepoužívejte poškozený síťový adaptér USB a nepokoušejte se jej opravit.
- Nepoužívejte vadný nabíjecí kabel.
- Nepoužívejte jej ani jej nenabíjejte v blízkosti vody. Přístroj nesmí přijít do styku s vodou nebo jinými kapalinami, pokud je připojen k elektrické síti. Nikdy neponořujte výrobek během nabíjení do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.

• Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, pokud se během nabíjení vyskytnou závažná, jakmile je přístroj plně nabitý, během bouřky nebo před čištěním přístroje.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Tento přístroj obsahuje lithiium-polymerový akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Lze ho vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor ekvivalentního typu. Pokud je akumulátor vadný, obraťte se na odborný servis.
- Nenabíjejte výrobek v blízkosti výbušných plynů.

• **Pozor!** Lithiové akumulátory se mohou vznítit nebo explodovat, ...

... pokud jsou během používání, nabíjení, skladování nebo přepravy vystaveny silnému horku, slunci, ohni atd. nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

... pokud je rozeberete, hodíte do ohně nebo zkratujete. Nepokládejte na výrobek ani do jeho blízkosti žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné otevřené plameny musí být vždy udržovány v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se zabránilo šíření ohně.

• Na akumulátorech neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahrávejte/nerozkládejte. Výrobek neponořujte ani do vody.

• Během nabíjení se přístroj nemůže ani nesmí používat. Při nabíjení jej vždy sundejte z těla.

• Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném nebo na nabíjecím kabelu viditelná poškození.

• Neprovádějte na přístroji žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborném servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

POZOR – lehká zranění a věcné škody

- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Na přístroj nesedějte! Nepokládejte na něj také žádné těžké předměty. Tím dojde k jeho poškození.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor zcela nabijte.

▷ Přístroj můžete vyjmout z držáku za účelem nabití (obr. 5).

1. Připojte nabíjecí zdířku USB-C pomocí nabíjecího kabelu k vhodnému síťovému adaptéru USB a zapojte jej do síťové zásuvky. Kontrolka svítí červeně.

Akumulátor je plně nabitý, když kontrolka svítí zeleně.

2. Poté odpojte síťový adaptér ze zásuvky a odpojte nabíjecí kabel.

Doba nabíjení v případě vybitého akumulátoru je přibližně 1 hodina.

Doba provozu při plně nabitém akumulátoru je cca 3 hodiny.

 • Pokud kontrolka bliká červeně, je akumulátor téměř vybitý a musí se nabít.

• Během nabíjení se přístroj nemůže ani nesmí používat.

• Akumulátor nabíjejte při teplotách mezi +10 a +40 °C.

• Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

• Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co možno nejdéle, nabíjejte akumulátor každé tři měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá. Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se zkracuje doba provozu.

Použití

Korektor držení těla můžete nosit pod oblečením nebo přes oblečení.

1. Smyčky na paže nastavte tak, aby přístroj těsně přiléhá k tělu, ale neškrtlil Vaše ramena.

2. Pro zapnutí přístroje podržte vypínač  stisknutý, až přístroj 4x zavibruje. Kontrolka svítí modrobíle.

Jakmile nyní předkloníte tělo o více než 25° dopředu, reaguje přístroj opakovanými krátkými vibracemi, dokud se opět nenarovnáte.

Indikátor vedle kontrolky zároveň počítá, jak často přístroj reagoval. Při vypnutí je tento počet vymazán a při opětovném zapnutí se spustí od nuly.

▷ Pro vypnutí přístroje podržte vypínač  stisknutý.

Ošetřování

POKYN – věcné škody

- Neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

▷ Před čištěním odpojte přístroj od napájení.

▷ V případě potřeby otřete přístroj mírně navlčeným hadříkem. Popruhy můžete prát ručně ve vlažné vodě. Poté je nechte uschnout na vzduchu. Nepokládejte je na topení!

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně vestavěn ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Technické parametry

Model:	727 231
Akumulátor:	lithium-polymerový, 3,7 V  , 150 mAh (symbol  označuje stejnosměrný proud) Jmenovitá energie: 0,55 Wh (testováno podle UN 38.3)
Doba nabíjení:	cca 1 hodina
Max. doba provozu:	cca 3 hodiny
Příkon:	DC 5 V / 1,0 A (SELV)
Jmenovitý výkon:	2,5 W
Spotřeba el. energie ve vypnutém stavu:	0,3 W
Třída ochrany:	III 
Síťový adaptér (není součástí balení):	
Vstup:	AC 100-240 V 50/60 Hz
Výstup:	DC 5 V 1,0 A
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Další informace o použitém akumulátoru:

Výrobce:	Dongguan Xintongda Electronic Technology Co., Ltd. No. 31, Renmin Road, Qinghuitou Town, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, Room 401, PR China
E-mail:	2682104208@qq.com
Model:	402030-150 3,7 V 150 mAh
Datum výroby:	2025/10
Vyrobeno v:	Čína

Výrobce:
Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands
(Nizozemsko)

Číslo výrobku: 727 231



www.tchibo.cz/navody